



15 MIN

LA MISE EN PLACE DE L'ORTHÈSE **END-SEVER**

"Redonnons le sourire à nos enfants sportifs"



Orthorepass



Matériel nécessaire

Un fer à repasser
avec thermostat et vapeur




&

Un chiffon en coton



&

Une orthèse End-Sever

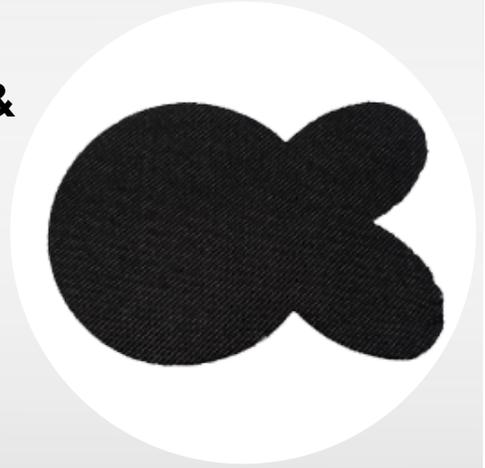

Temps de mise en oeuvre

15 min environ

Précaution

L'orthèse est composée d'une matière thermoformable qui s'assouplit à **80°C**.
L'orthèse est recouverte de lycra, une chaleur excessive du fer à repasser peut brûler le lycra et détériorer l'orthèse.

Veillez à bien régler le fer sur 80°C maximum

Il est conseillé de lire une première fois l'ensemble de la procédure de mise en place avant de commencer. Suite à cela, vous pouvez décider de la mettre en place vous-même (recommandé) ou de la faire placer par votre médecin.

Installation de l'enfant

L'enfant doit être installé confortablement à plat ventre, la jambe est pliée et l'angle entre le pied et la jambe est de 90° environ.

Mise en place



1

Faites chauffer le fer à thermostat **80°C (vapeur activée)**

2

Lorsque le fer est chaud, posez le chiffon en coton sur l'orthèse et repassez l'orthèse jusqu'à ce qu'elle devienne souple



Prenez garde à ne pas vous brûler lorsque vous manipulez l'orthèse

3

Moulez soigneusement l'orthèse et assurez-vous qu'elle épouse parfaitement **le talon**

4

Laissez refroidir **10 min** jusqu'à durcissement total



Le pied de l'enfant doit rester immobile jusqu'au durcissement total de l'orthèse.

5

Le moulage de l'orthèse est terminé



6

Glissez l'orthèse dans la chaussure



L'utilisation d'une chaussette fine est recommandée



Entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement et délicatement l'orthèse avec de l'eau tiède et du savon.

Après utilisation, l'orthèse peut être jetée avec les déchets domestiques.

Recommandations d'utilisation

L'orthèse est utilisée seulement dans le cadre du traitement de la pathologie d'Osgood-Schlätter.

- L'orthèse ne doit pas être utilisée pour un usage interne.
- L'orthèse ne doit pas être appliquée sur une plaie ouverte ou dans la bouche.
- Ne jamais utiliser de flamme pour assouplir l'orthèse.
- Ne jamais exposer une orthèse à une température supérieure à 60°C (voiture garée au soleil, radiateur chaud, cheminée, sèche-cheveux...)

Mise en place de l'orthèse en vidéo

Une vidéo est disponible sur notre chaîne **Youtube : orthorepass**



https://www.youtube.com/watch?v=CXNpGKO-CXQ&feature=emb_title

Depuis **2018**
Nous avons
redonné le
sourire à plus
de **1300** enfants



NOUS CONTACTER

 +33 6 03 08 18 64

 38 bis avenue Jean Jaurès
31170 Tournefeuille

   @orthorepass

 contact@orthorepass.com

 www.orthorepass.com